



## **ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА АЛМАГ-02 В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

## УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Бронхолёгочные заболевания занимают одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости и ежегодно поражают до 30% населения России, повышая уровень инвалидизации и смертности населения.

Частота их возникновения растёт что имеет массу негативных последствий – как медицинского, так и социального характера.

Перед медицинскими учреждениями стоит непростая задача – в сложных условиях оказать людям своевременную и высококачественную лечебную помощь, что сопряжено с необходимостью в ресурсах: человеческих, финансовых, лекарственных, технических.

И все это – в нереально трудной обстановке перегруженности больниц и нехватки кадров!

С целью сокращения сроков стационарного лечения пациентов с бронхолегочными заболеваниями и облегчения работы медперсонала предлагаем вам включить в лечебный комплекс доступную медицинскую технику с доказанной эффективностью – аппарат **АЛМАГ-02**.



Аппарат отличается мобильностью, компактностью, малым весом и лёгкой транспортировкой в палаты и врачебные кабинеты.



Изначально разработан для организации физиотерапевтического лечения в ЛПУ, не имеющих в своем составе физиотерапевтов, в многопрофильных ЛПУ, для разгрузки аппаратов ПОЛИМАГ.

Является экономичной и упрощённой версией ПОЛИМАГа – меньших габаритов, но с аналогичными возможностями и проверенной эффективностью стационарной техники.

Процедуры удобно проводить непосредственно в палатах, что рационализирует процесс лечения.

Аппарат предназначен для терапии низкочастотным низкоинтенсивным магнитным полем острых и хронических заболеваний различных систем организма, в том числе бронхолегочной системы.

**АЛМАГ-02 не требует обязательного участия специалиста и способен освободить медика для других дел на время лечебного сеанса.**

**АЛМАГ-02 – связующее звено между простой портативной техникой и эффективностью стационарной медицинской аппаратуры типа ПОЛИМАГ-02М!**

Болезни органов дыхания – серьезная проблема современного здравоохранения.

## БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ – ОДНА ИЗ ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ И ХОРОШО ИЗУЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ АППАРАТА.



### Показания к применению аппарата АЛМАГ-02 при заболеваниях бронхолёгочной системы:

- Пневмония вирусная
- Пневмония бактериальная
- Хронический бронхит вне стадии обострения
- Бронхиальная астма и ХОБЛ
- Экссудативный плеврит (после удаления жидкости из плевральной полости, через трое суток после торакоцентеза)

При тяжёлых лёгочных заболеваниях обязательна комплексная терапия, включающая средства, активизирующие иммунитет, например, магнитотерапия.

Работа аппарата АЛМАГ-02 основана на лечебном эффекте бегущего импульсного магнитного поля, обладающего противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим действием.

В соответствии с Приказами Минздрава РФ № 1213н и № 1658н об утверждении стандарта специализированной и первичной медико-санитарной помощи при пневмонии взрослым и детям с целью профилактики, лечения и медицинской реабилитации должна оказываться услуга А17.30.019 (воздействия переменным магнитным полем).

Магнитотерапия повышает эффективность доставки лекарств, а также обладает собственным лечебным действием при легочных заболеваниях.





# ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА АЛМАГ-02

## При пневмониях аппарат АЛМАГ-02 способствует:

- улучшению циркуляции крови и газообмена в легких;
- замедлению размножения патогенных микроорганизмов;
- усилению детоксикации очага инфекции;
- активизации иммунитета;
- снятию спазма бронхов, уменьшению кашля и улучшению отхождения мокроты;
- уменьшению вязкости выделений и выведению их из легких;
- устранению лёгочного спазма и раздражения воспаленных тканей;
- снижению медикаментозной нагрузки на организм;
- сокращению сроков лечения, ускорению реабилитации пациента;
- улучшению общего состояния больного;
- ускорению восстановления после воспаления;
- окончательному подавлению воспалительного процесса;
- недопущению хронических проблем с легкими, осложнений, утраты трудоспособности.

**Метод обладает доказанным высоким эффектом применения и абсолютно безопасен при соблюдении правил лечения и противопоказаний.**



Аппарат формирует два вида импульсного магнитного поля – «бегущее» и «неподвижное» – самые эффективные для терапевтических целей.



В памяти аппарата заложены 79 лечебных программ воздействия, разработанных специалистами Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко (г. Москва), что позволяет индивидуально подходить к лечению различных заболеваний, стадий и состояний пациента.



Индивидуальная программа активируется нажатием одной кнопки, после чего аппарат начинает работать по программе, предусмотренной именно для данной болезни или её стадии, обеспечивая максимально возможный эффект.




Небольшой вес и повышенная износостойкость излучателей позволяют эксплуатировать аппарат так интенсивно, как требуется в условиях повышенной заболеваемости.




Малые габаритные размеры обеспечивают возможность лечения лежащих больных непосредственно в палатах, а также внедрить стационарозамещающие технологии.


### ОСНОВНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

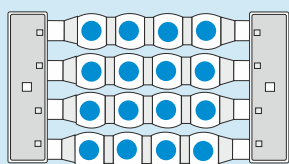


неподвижное поле

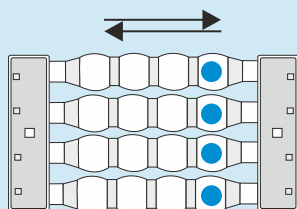

бегущая вертикаль

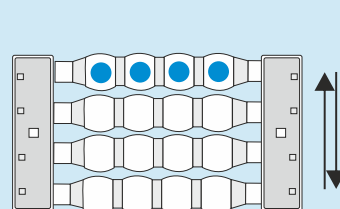

бегущая горизонталь

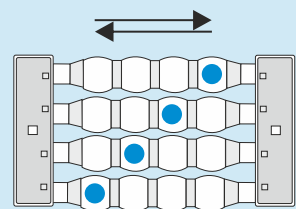


бегущая диагональ

### ЛОКАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ




неподвижное поле

### ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ ГИБКАЯ

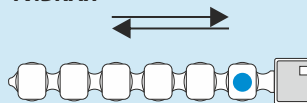

бегущая горизонталь

### ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ ГИБКАЯ

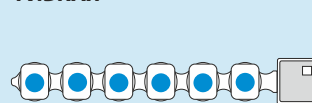

неподвижное поле

# Алмаг-02 отлично зарекомендовал себя как надёжное и действенное медицинское средство.

## Преимущества аппарата АЛМАГ-02



безопасность и простота эксплуатации не требует специального обучения медицинского персонала



надежность работы в широком диапазоне внешних условий



высокая глубина проникновения магнитного поля, позволяющая проводить воздействие на внутренние органы



эффективность у пациентов любого возраста



ускорение процесса лечения и реабилитации бронхолёгочных больных



отсутствие эффекта привыкания и передозировки



существенное уменьшение суммарных затрат на лечение за счет сокращения сроков стационарного нахождения пациентов и снижения количества принимаемых лекарственных средств



возможность применения в палатах для тяжелых лежачих пациентов



способствует освобождению времени, экономии сил, рационализации и облегчению труда медперсонала, так как не требует постоянного нахождения с пациентом в период сеанса магнитотерапии



высокое проверенное качество

**АЛМАГ-02 может существенно ускорить лечение и реабилитацию лёгочных больных и сократить сроки нахождения пациентов в стационаре.**



Компания ЕЛАМЕД предлагает вам оптимальные условия покупки, доставки и установки медицинской техники и готова взять на себя все сопутствующие хлопоты. Спасибо за ваш бесценный вклад в здоровье людей!